

THE WHITENING GEL and THE LIGHT TRANSMITTER

MODE D'EMPLOI

A lire attentivement

Quelques personnes peuvent ressentir une irritation passagère de la gencive ou une sensibilité dentaire : ceci n'est que temporaire et sans gravité

Ce système a été conçu pour le blanchiment de dents naturelles à l'exclusion de tous appareils dentaires, bridges, couronnes, etc...

Ce produit ne blanchira pas les traces causées par l'utilisation de la tetracycline

En cas de gingivite ou rétention de gencive, consulter votre dentiste avant toute utilisation du produit

PRECAUTIONS

Ne pas laisser ce produit à portée des enfants

Ne pas utiliser ce produit chez les enfants âgés de moins de 16 ans sans avis préalable de votre dentiste

Ne pas utiliser chez les femmes en cours d'allaitement

Ne pas utiliser pendant un traitement orthodontique

Ne pas utiliser l'appareil pendant le sommeil

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau
Eviter tout contact avec la peau sous peine d'irritation temporaire. En cas de contact, se laver les mains avec eau et savon

Eviter toute projection sur vêtements

Conserver le produit dans un endroit sec et à l'abri de la lumière

UTILISATION DU PRODUIT

Brossage normal des dents avant usage

Oter le bouchon du flacon de gel

Appliquer le produit en mince filet le long des parois supérieure et inférieure de l'appareil

Placer l'appareil entre vos dents

Appliquer le LIGHT TRANSMITTER sur l'appareil

Recouvrir le LIGHT TRANSMITTER avec vos lèvres pour le maintenir en place

Appuyer sur l'interrupteur du LIGHT TRANSMITTER

Le LIGHT TRANSMITTER s'arrêtera automatiquement au bout de 10 minutes, indiquant la fin d'un cycle complet